

## » Silla P.C.I con Elevapiernas 15 plg OA695841



### DESCRIPCIÓN

La silla de ruedas P.C.I con elevapiernas combina tecnología avanzada y comodidad para proporcionar una experiencia de movilidad excepcional. Diseñada para adaptarse a las necesidades individuales de los usuarios, esta silla de ruedas está diseñada especialmente para personas con parálisis cerebral; tiene un diseño cómodo y seguro.



### DATOS TÉCNICOS

	LONGITUD TOTAL 110 cm		ANCHO TOTAL 59 cm		ALTURA TOTAL 115 cm		PESO MÁXIMO DEL USUARIO 75 kg
	PROFUNDIDAD ASIENTO 46 cm		ASIENTO RECLINADO 160°		ALTURA DEL ASIENTO 52 cm		ÁNGULO DEL RESPALDO 90° - 180°
	ALTURA DEL RESPALDO 40 cm		ANCHO PLEGADA ESTRUCTURA 33 cm		PESO TOTAL 29 kg		PENDIENTE MÁXIMA 10°
	ALTURA ELEVAPIERNAS 19 - 41 cm		COLOR CHASIS Azul		COLOR (OTRO) Tapizado: Tela mesh Negro / Rojo		



### CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico para mayor comodidad.
- Respaldo ajustable para diferentes posiciones.
- Estructura resistente y duradera.
- Ajuste para profundidad de la cabecera.
- Palancas hidráulicas para reclinar el respaldo y el asiento.

- Sujetadores laterales para el torso y piernas acojinados, desmontables.
- Descansabrazos ajustables al ancho requerido.
- Sistema para reclinar el asiento por medio de mecanismo hidráulico.
- Tornillo de ajuste para profundidad de la cabecera.
- Tornillo de ajuste para altura de la cabecera.
- Bolsillo trasero porta objetos.
- Ruedas antivuelco.
- Sujetador de torso acojinado, ajustable, desmontable y con velcro.
- Elevapiernas desmontables.
- Posapiés abatibles.
- Cabecera ergonómica gira 360, acojinada, con altura y posición de profundidad.
- Frenos de palanca.



## MATERIALES

- Estructura: Chasis y tubos del respaldo de acero de alta resistencia.
- Asiento y respaldo: Tela mesh
- Sujetador de torso: Lona poliéster
- Empuñaduras: PVC
- Ruedas delanteras giratorias de 6" (15.24 cm) x 1 1/2.
- Ruedas traseras neumáticas de cañuela 15" (38 cm) x 1 1/2.
- Mecanismo de plegado en estructura, Cruceta reforzada.



## FUNCIONALIDAD

	SI	NO
PLEGABLE ESTRUCTURA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
TIPO DE PLEGADO	Cruceta	
REPOSAPIÉS ABATIBLES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPOSABRAZOS ABATIBLES	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
FRENOS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



## ACCESORIOS

	SI	NO
CINTURÓN DE SEGURIDAD	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
BOLSA DE ALMACENAMIENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
PORTAVASOS	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



## MANTENIMIENTO

1. Se recomienda limpiar con regularidad las ruedas y mecanismos.
2. Verificar y ajustar frenos según sea necesario.
3. Revisar y apretar tornillos y conexiones periódicamente.



## GARANTÍA


Magnimed no se hace responsable de los daños sugeridos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros.
- Modificaciones técnicas.
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados.
- Por defecto de fábrica aplica sólo dentro de los 7 días después de haber recibido su compra.




## EMPAQUE

UNIDAD	Caja
CANTIDAD	1 pieza
DIMENSIONES DE LA CAJA	86 x 33 x 100 cm (largo x ancho x alto).
PESO DE LA CAJA	31 kg

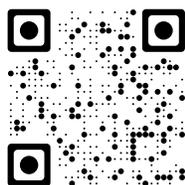

*Video Informativo  
Silla P.C.I con Elevapiernas 15 plg*

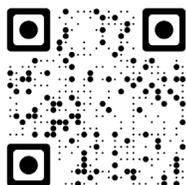

*Visita nuestra página web*

### ¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número **(81) 8340 4668**.

Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.