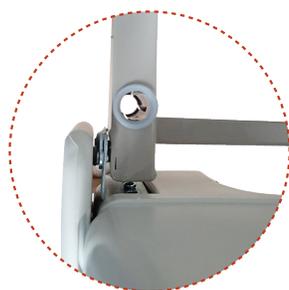


## » Cama de Hospital Eléctrica OA83230

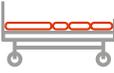
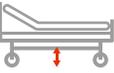
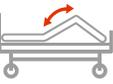


### DESCRIPCIÓN

La Cama de Hospital Eléctrica de 3 Posiciones es un equipo médico diseñado para proporcionar comodidad y seguridad a pacientes que requieren atención hospitalaria. Con un diseño ergonómico y funcional, esta cama ofrece tres posiciones ajustables que permiten adaptarla a las necesidades específicas de cada paciente, facilitando así su cuidado y recuperación.



### DATOS TÉCNICOS

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <br><b>LONGITUD TOTAL</b><br>202 cm               | <br><b>ANCHO TOTAL</b><br>91 cm       | <br><b>ALTURA TOTAL</b><br>78 cm      | <br><b>PESO MÁXIMO DEL USUARIO</b><br>150 kg |
| <br><b>DIMENSIONES DEL SOMIER</b><br>- / - / - cm | <br><b>ALTURA BASE-SUELO</b><br>50 cm | <br><b>ÁNGULO DEL RESPALDO</b><br>75° | <br><b>ÁNGULO DEL MUSLO</b><br>45°           |
| <br><b>AJUSTE DE ALTURA</b><br>38 - 70 cm         | <br><b>PESO TOTAL</b><br>83 kg        | <br><b>COLOR CHASIS</b><br>Beige      |   |



## CARACTERÍSTICAS

- Tres posiciones de ajuste.
- Control alámbrico para ajustar posicionamiento de la cama.
- Sistema de bloqueo seguro en las ruedas para mantener la posición deseada.
- Dos perforaciones para colocar el portasuero.
- La estructura de la cama ha sido diseñada para ser transportada y almacenada fácilmente, así como para montarla y desmontarla con la misma facilidad.



## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

### Información técnica modelo: FD60-24-A4-388.588-C52

- Voltaje de entrada: 12 V CC/24 V CC.
- Carga máx.: 6000N (Empujar) / 4000N (Tirar)
- Velocidad máxima sin carga: 33,3 mm/seg (valor típico)
- Velocidad a plena carga: 2,9 mm/s (valor típico a 6000 N cargado)
- Carrera: 50~300 mm
- Nivel de ruido:  $\leq 50$ dB
- Nivel de IP: IP42 (estático; sin acción)
- Finales de carrera preestablecidos
- Ciclo de trabajo: 10%, máx. 2 minutos. funcionamiento, continuo en 20 min.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -20°C ~ +65°C
- Certificado: Norma UL 962 para muebles domésticos y comerciales.
- Cumple con la marca CE y la directiva EMC 2014/30/UE



### Mando botones:

-  Posición de sentado
-  Sección de los muslos y sentado
-  Sección de los muslos
-  Somier horizontal



## MATERIALES

- Estructura y desmontables de acero (esmaltado), color beige.
- Barandales de aluminio plegable.
- Cabecera y piecera de PVC (100%) color beige y cafe.
- Tornillos y tuercas de acero (galvanizado).
- Motor con voltaje de salida 110 v.
- Ruedas giratorias 360° de silicón de 5".



## FUNCIONALIDAD

|                         | SI | NO |
|-------------------------|----|----|
| BARANDALES ABATIBLES    | ●  | ○  |
| BARANDALES DESMONTABLES | ●  | ○  |
| CONTROL ELÉCTRICO       | ●  | ○  |
| MANIVELA PARA PIES      | ○  | ●  |
| MANIVELA PARA CABECERA  | ○  | ●  |
| 4 LLANTAS               | ●  | ○  |



## ACCESORIOS

|             | SI | NO |
|-------------|----|----|
| PORTA SUERO | ○  | ●  |
| TARJETERO   | ○  | ●  |
| MESA        | ○  | ●  |



## MANTENIMIENTO

1. Lea el manual del usuario antes de usar este producto y siga todas las instrucciones de seguridad y uso.
2. Inspeccione visualmente la cama. Compruebe si las piezas presentan signos de desgaste o deterioro externo.
3. Limpie y desinfecte el producto cuando haya estado en contacto con fluidos corporales y antes de usarlo con un nuevo usuario.
4. Se recomienda usar un desinfectante para superficies a base de alcohol (con 70-90 % de alcohol).
5. Revise los puntos de lubricación de la cama y engráselos del modo adecuado, al menos cada dos años con lubricante líquido WD-40.
6. Recomendamos encarecidamente que se realice un mantenimiento completo un año sí y otro no, así como una revisión anual de los pistones.
7. Riesgo de descarga eléctrica, apague el dispositivo y desconéctelo.
8. No toque la toma de corriente con las manos mojadas.



## GARANTÍA

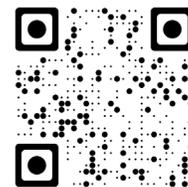
**Magnimed no se hace responsable de los daños sugeridos por:**

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros.
- Modificaciones técnicas.
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados.
- Por defecto de fábrica aplica sólo dentro de los 7 días después de haber recibido su compra.



## EMPAQUE

|                        |  |
|------------------------|--|
| UNIDAD                 | Caja                                     |
| CANTIDAD               | 1 pieza                                  |
| DIMENSIONES DE LA CAJA | 202 x 94 x 31 cm (largo x ancho x alto). |
| PESO DE LA CAJA        | 91 kg                                    |



Visita nuestra página web

### ¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número **(81) 8340 4668**.

Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.